

Fi-G Fi-P

Fi-G 15 saniyelik en kısa ısıtma ve erime süresini sağlar.



Gutta-percha Obtürasyon Sistemi

Fi-G

0.5mm enjeksiyon iğnesi

Gutta-percha sızıntısını önler
360 derece dönebilen
enjeksiyon iğnesi

15 saniyede hızlı ısıtma

Geri dönüş önleyici yapıya
sahip itme silindiri

Fi-P

0,2 saniyede hızlı ısıtma

0,35 mm eğimli uç

Fi - P



2 saniye ısıtma süresi

Yüksek performanslı dönüş sistemi, verimli bir kesim performansı sağlar



0.35mm eğimli uç

Daha ince uçlar, dar kök kanalının derinliklerine nüfuz ederek size daha iyi bir tedavi etkisi sağlar.




Ürün fiyatı

606€
+KDV



Yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü

Sabit sıcaklık aşırı ısınmayı önler.

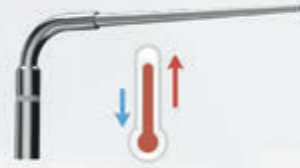

4 ayrı çalışma sıcaklığı

150°C, 180°C, 200°C, 230°C, piyasadaki farklı gutta-percha markaları ile eşleşebilir.



4 saat dayanıklılık

Yüksek kapasiteli bataryası ve özel ısıtma sistemi, tam dolu şarjla 1500 işlem sağlar.



Tip

Çap

Sivri Uç

WP3504	0.35mm	0.04
WP4004	0.40mm	0.04
WP4504	0.45mm	0.04
WP5004	0.50mm	0.04
WP5506	0.55mm	0.06
WP5508	0.55mm	0.08
WP5510	0.55mm	0.10
WP6072	0.60mm	0.12
WP5508L	0.55mm	0.08

Fi-G: 0°C-230°C için Süre (S)

**Woodpecker
markası**

15

**Korean B
markası**

24

**Chinese C
markası**

51

**Chinese D
markası**

56



Fi-G



15 saniye içinde hızlı ısıtma

Bekleme süresini azaltır ve çalışma verimliliğinizi artırır.



Ürün fiyatı

606€
+KDV



Gutta-percha sızıntısını önler

360 dönebilen iğne

Optimize edilmiş yapısı, 360° üniform dönüş özelliğiyle, gutta-percha sızıntısını etkili bir şekilde önler.




0.5mm enjeksiyon iğnesi

Kolay ulaşılan apikal 3mm kanal daha iyi bir dolgu sağlar.



Geri dönüş önleyici yapıya sahip itme silindiri

Mekanik kilitleme yapısı, itme silindirinin geri dönmesini engeller ve boşlukların oluşmasını önler.

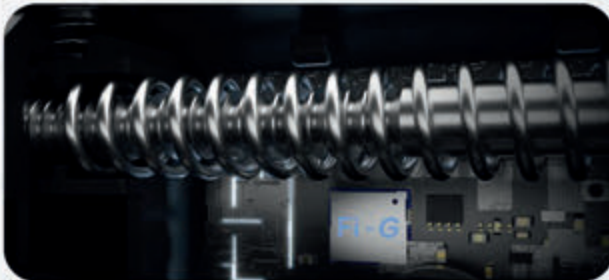

Tip	Boyut	Uzunluk
20G 22mm	20G	22mm
20G 24mm	20G	24mm
20G 28mm	20G	28mm
23G 24mm	23G	24mm
23G 28mm	23G	28mm
25G 24mm	25G	24mm



- 01 Hazırlanan kök kanalına uygun bir ana gutta-percha ucu seçin.



- 02 Isıtma ve Toplama cihazı için uygun ucu seçin, ucu kök kanalına yerleştirin ve apikal foramenden 3-5 mm uzakta tutun ve uzunluğu işaretlemek için bir ped kullanın. Aynı zamanda, aynı boyutta bir fulvar seçin.



- 03 Sızdırmazlık malzemesini ana gutta-percha ucuyla sokun ve ardından o gutta-percha ucunu kök kanalına yerleştirin.



- 04 Isıtma ve Toplama cihazının ucunu kök kanalına sokun, ısıtmak için ısıtma düğmesine basın, gutta-percha'nın fazla olan kısmını kesin ve çıkarın.



- 05 Ucu kök kanalına yerleştirin, ısıtmak için ısıtma düğmesine basın ve gutta-percha'yı yumuşatmak için ucu apikal foramenden 3-5 mm uzağa ulaşıncaya kadar itin.



Kök Kanal Doldurma İşlemleri



Isıtma ve Toplama Cihazı



Sıcak Eritme ve Dolum Tabancası



Fulvar



- 06 Isıtmayı durdurmak için ısıtma düğmesini bırakın, ancak ucuyla yaklaşık 10 saniye kök kanalındaki gutta-percha'ya bastırmaya devam edin.



- 07 Isıtma düğmesine yaklaşık 1 saniye basın ve gutta-percha'yı apikal foramenden 3-5 mm uzakta kalacak şekilde hızla çıkarın.



- 08 Kök kanalındaki gutta-percha'yı bastırmak için fulvar kullanın.



09

Sıcak Eritme ve Dolum Tabancasının iğnesini kök kanalındaki gutta-percha yüzeyine değdirin ve gutta-percha'yı yumuşatmak için 3 saniye orada tutun.



10

Erimiş gutta-percha'yı kök kanalına enjekte edin ve aynı anda iğneyi geri çekin. (Kök kanalını tek seferde tamamen doldurmayın. 3 defa doldurulması veya tek enjeksiyonda 4mm'yi geçmemesi önerilir.)



11

Kök kanalına enjekte gutta-percha'yı bastırmak için fulvar kullanın.



12

Kök kanal dolgusu bitene kadar 9, 10 ve 11. adımları tekrarlayın.



Standart Konfigürasyon

İsteğe Bağlı



Standart Konfigürasyon

İsteğe Bağlı

 **Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd.**
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R.China

Sales department: 0773-5873196/2350599

Fax: 0773-5822450

E-mail: woodpecker4@glwoodpecker.com

Website: <http://www.glzmn.com>, <http://www.glwoodpecker.com>

ZMN-XC-006

DAĞITICI


dünya
dental
“Gülmeye Odaklanın”